

# PRØVEUTTAKSVEILEDNING: GJELLESVABER

Korrekte prøvetakingsprosedyrer og behandling av vevsprøver er viktige for å sikre optimal kvalitet på analysene.

Denne veiledningen inneholder PatoGens anbefalinger om hvordan man sikrer optimal kvalitet på svaberprøver for sanntids-PCR-analyser.

Generelt anbefales det at prøveuttak utføres av personale med god erfaring. Etter avtale kan PatoGen sørge for prøveuttak eller opplæring av personale i rutiner for prøveuttak.

## PatoGen prøvetakingspakke med ENAT og svabere

Pakken er utviklet som en del av PatoGens kvalitetskontrollsystem, og består av svabere, merkede prøverør, isposer og emballasje for transport av prøvene til Patogen sine laboratorier. Systemet er utviklet for å forhindre utveksling av prøver og sikre god kvalitet på prøvene som sendes til PatoGen. Kittene har en holdbarhet på seks måneder (utløpsdato er trykt på siden av settet) og skal oppbevares ved romtemperatur frem til bruk.

## PRØVETAKING


### Prøvetakingsutstyr

- PatoGen-rør med ENAT-buffer
- Sterile svabere



### Ikke-invasiv svabring av gjeller


- Svabringen kan utføres i forbindelse med andre operasjoner som lusetelling.
- Fisken skal bedøves i forkant av prøvetakingen.

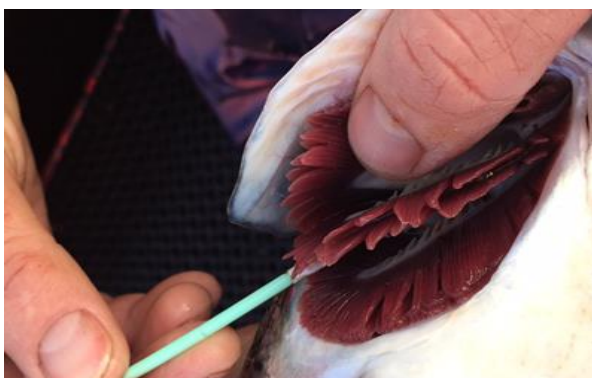

- Hold fiskens gjellelokk åpent når svabringen utføres. Med fisken venstre side opp skal en svabre utsiden og innsiden av 1. gjellebue. Fortsett med begge sider av 2, 3 og 4. gjellebue inntil svaberen er full. Kjør svaberen

fra buen til spissen av gjellen mens du roterer svaberen noe. Hvis nødvendig bruk pinsett for å løfte gjellelokket for å minimere kontaminering.

- Når gjellebuene er ferdig svabret putt svaberen i bufferrøret.
- Hver svaber har et knekkpunkt. Når svaberenden er av og i bufferen, skru på igjen rørløkket.

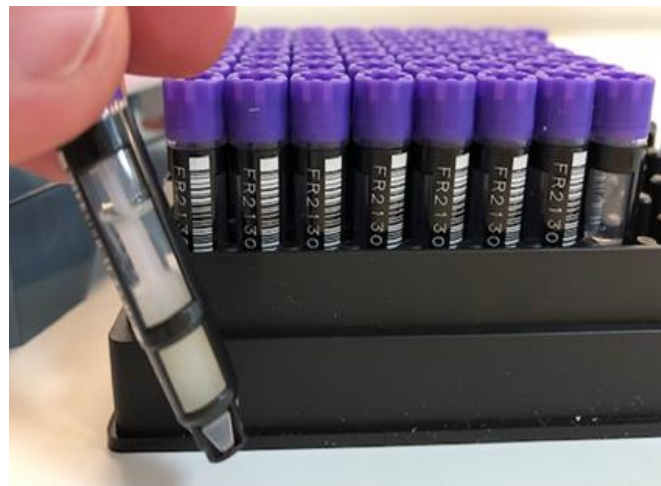

### Registrering av informasjon

Registrer prøveuttaket elektronisk i PatoLink eller i bestillingsskjema som fulgte prøveinnsamlingspakken.

Se «Veileder: Registrere prøveuttak i PatoLink», og kontakt oss om du har spørsmål om tilgang til eller bruk av PatoLink.

Alle prøveuttak som registreres i PatoLink får kortere leveringstid - 4 virkedager svartid mot normalt 5 virkedager.

### Forsendelse

Dersom ikke hele kittet brukes opp kan prøverørene legges i en plastpose og sendes inn, slik at resten av kittet kan brukes senere.

Prøvene sendes til PatoGen med kjøleelement/ispose. Pakken sendes med ekspress over natt til adressen under. Send sporingsnummer til [sample@patogen.no](mailto:sample@patogen.no) eller +47 957 07 910.

**PATOGEN AS - RASMUS RØNNEBERGS GATE 21 - 6002 ÅLESUND**

**PATOGEN NORD AS - KLINKERVEIEN 8 - 8006 BODØ**