

PRØVEUTTAKSVEILEDNING – GJELLESVABER

For å sikre god kvalitet på analysen, er korrekt prøveuttak og behandling av prøvematerialet avgjørende. Denne veilederen beskriver PatoGens retningslinjer for uttak og håndtering av svaberprøver.

Utstyret er beregnet til engangsbruk og kan brukes til prøvetaking av gjeller. Kittene har en holdbarhet på seks måneder (utløpsdato er angitt på siden av settet) og skal oppbevares i romtemperatur inntil bruk. *Etter avtale kan PatoGen tilby veiledning om prøveuttak eller opplæring av personell i prøvetakingsrutiner*


Utstyr:


- Rør med ENAT-buffer
- Sterile svabere
- Engangshansker
- Ispose



Forslag til prøvetaking:

- Svabringen kan utføres i forbindelse med andre operasjoner som lusetelling.
- Fisken skal bedøves i forkant av prøvetakingen.
- Hold fiskens gjellelokk åpent når svabringen utføres. Med fisken venstre side opp skal en svabre utsiden og innsiden av 1. gjellebue. Fortsett med begge sider av 2, 3 og 4. gjellebue inntil svaberen er mettet. Beveg svaberen fra basis til tuppen av gjellen mens du roterer svaberen noe. Hvis nødvendig, bruk en pinsett for å løfte gjellelokket for å minimere kontaminering.
- Når gjellene er ferdig svabret, kan svaberen plasseres i bufferrøret.
- Svaberen har et knekkpunkt som gjør det mulig å bryte av svaberenden. Når svaberenden er plassert i bufferen, skru på rørløkket igjen for å sikre prøven.

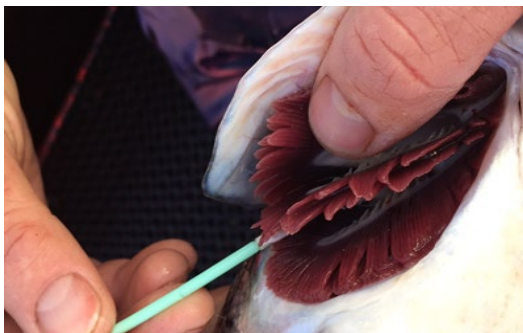

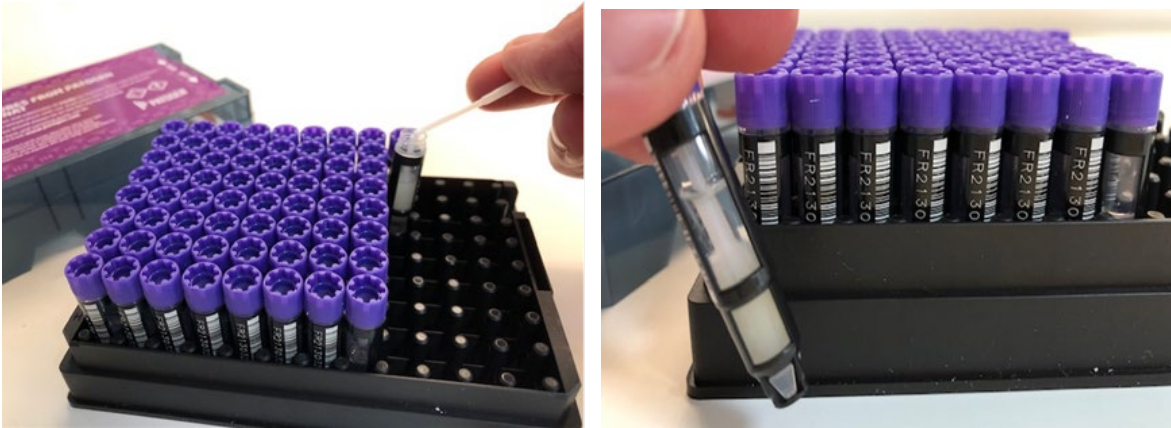

Sending av prøver:

Registrer prøveuttaket elektronisk i PatoLink. *Kontakt oss dersom du har spørsmål om tilgang til eller bruk av PatoLink.*

Dersom ikke hele kittet brukes opp kan prøverørene oppbevares i romtemperatur slik at resten av kittet kan brukes senere. Send rørene i en polstret konvolutt sammen med en ispose, ekspress over natt til PatoGens laboratorium:

[Sending samples - PatoGen](#)

NO: PATOGEN AS - Rasmus Rønnebergs gt. 21, 6002 Ålesund

UK: PATOGEN - Malin House - European Marine Science Park - Dunbeg - PA37 1SZ Oban