

PRØVEUTTAKSVEILEDER - YNGEL

For å sikre god kvalitet på analysene, er korrekt prøveuttak og behandling av prøvematerialet avgjørende. Denne veilederen beskriver PatoGens retningslinjer for uttak og håndtering av vevsprøver fra startforing og yngel 2 gram.

Nyre – V-snitt

Bruk v-snitt når du prøvetar nyre fra startforing og 2 grams yngel. Plasser organpakken på innsiden av skalpellemballasjen og del den i to like biter på ca. 2x2x2 mm (hvis det er nok vev). Pass på at vevsbitene er helt dekket av RNA-later i røret.



Hjerte – A-snitt

Bruk a-snitt når du prøvetar hjerte fra startforing og 2 grams yngel. Plasser organpakken på innsiden av skalpellemballasjen og del den i to like biter på ca. 2x2x2 mm (hvis det er nok vev). Pass på at vevsbitene er helt dekket av RNA-later i røret.



V-snitt for plommesekk yngel – gjelle, hjerte og nyre

Bruk ett bredt v-snitt når du prøvetar gjelle, hjerte og nyre fra plommesekk yngel. Plasser organpakken på innsiden av skalpellemballasjen og del den i to like biter på ca. 2x2x2 mm (hvis det er nok vev). Pass på at vevsbitene er helt dekket av RNA-later i røret.

